

# PRODUKTDATABLAD

## Klinion Skin Adhesive, vævslim ampul, steril

Klinion Skin Adhesive® er beregnet til at lukke rene, friske hudsår med tætliggende kanter og kan med fordel anvendes på følgende sårtyper:

Kirurgiske snit.  
Punkteringer fra minimalt invasiv kirurgi.  
Enkle, grundigt rensede, traumefremkaldte flænger.

Klinion Skin Adhesive® bør påføres af folk med læge eller sygeplejefaglig uddannelse.

Kun til engangsbrug, må ikke bruges på flere mere end en patient. Må ikke bruges på indre organer, blodkar, nervevæv eller slimhinder. Må ikke bruges på inficerede eller kroniske sår. Må ikke bruges på patienter med følsomhed overfor cyanoacrylat eller formaldehyd. Må ikke bruges på ledmuskler eller strækmuskel overflader.

Klinion Skin Adhesive® kan bruges sammen med, men ikke i stedet for dybe dermale suturer.

- Klar til brug efter 3 enkle trin
- Stylus® applikator sikrer nem påføring
- Hurtig tørretid på 60 sekunder
- Kan bruges i 15-20 minutter efter at ampullen er trykket ind i applikatorhylsteret
- Danner en mikrobiel barriere
- Opbevaring ved stuetemperatur, og ikke i direkte sollys.
- Engangsbrug
- Steril



# PRODUKTDATABLAD

## Klinion Skin Adhesive, vævslim ampul, steril

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Octyl-cyanoacrylat
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIB
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Produktet skal opbevares på et køligt, godt ventileret og tørt sted væk fra direkte sollys. Anbefalede opbevaringstemperaturer er maksimalt 30 grader
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	2 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes i henhold til lokale regler
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref.nr.
6490011	Klinion Skin Adhesive	vævslim ampul, steril	0,5 g	æske a 12 stk	3063854