

Tube-Flexi

fleksibel fiksering til dræn, slanger og katetre (REF 6028101; REF 6058101 steril)



Anvendelsesområde

Sikker og fleksibel fiksering til dræn, slanger og katetre.
Tube-Flexi kan bruges på slangetykkelse mellem CH8-18.

Brugsanvisning

Udstyret er beregnet til brug af uddannet sundhedspersonale eller personer som er instrueret af uddannet sundhedspersonale.
Klæbepuden mod huden kan ikke flyttes eller repositioneres, når den er monteret.
Slangefikseringen kan løftes og fastgøres igen, hvis det er nødvendigt.

1. Rengør huden, hvor klæbepuden skal fastgøres.
Huden skal være tør, når den fastgøres.
2. Åbn emballagen ved at opdele taperne i siden og tag Tube-Flexi ud.
3. Fjern beskyttelsesfilmen på undersiden af puden, og fastgør den til huden.
4. Træk beskyttelsesfilmen af på toppen af strimlen, og placer slangen i midten.
5. Fold taperne af plast, der vender mod hinanden, over slangen og forsegl.
6. Fikseringen kan åbnes og fastgøres igen, hvis det er nødvendigt.
7. Når slangen skal skiftes, adskilles de to plastikklapper, og en ny slange fastgøres.
8. Pudene, der sidder mod huden, kan forblive på plads, når slangen skiftes.
Udskiftning af pudene anbefales i tilfælde af forurening.
9. Når hele fikseringen skal fjernes: Start med at fjerne slangen, og fjern derefter klæbepuden, der sidder mod huden. Hold fast i den omgivende hud, når pudene trækkes væk for at reducere ubehag.

Tube-Flexi **KAN** forblive på huden i op til 5 dage, eller indtil dens klæbeevne ophører.

*Bemærk, at anbefalingen på 5 dage angiver, hvor længe det er tilrådeligt at have klæbepuden på huden i samme position, ikke hvor længe den **SKAL** sidde. Hvis fikseringens klæbeevne ophører tidligere, er der normalt en grund - se fejlfinding.*

Fejlfinding – hvis Tube-flexi ophører med at klæbe

Mulig årsag	Afhjælpning af problemet
Tube-flexi blev ikke varmet op, når den blev placeret	Placer nyt og varm Tube-flexi op med din hånd, inden du påfører dræn, slanger eller katetre
Patientens hud er kold, når den fastgøres	Varm huden op ved f.eks. at lægge et varmt håndklæde eller tøj på fikseringsstedet inden påføring
Patientens hud er fugtig	Tør huden, hvor klæbepuden skal sidde.
Tube-flexi er blevet forurenset	Rens huden og påsæt en ny klæbepude
Sår er dukket op under klæbepuden	Flyt klæbepuden til en anden position
Huden under Tube-flexi er udblødt/opløst	Flyt klæbepuden til en anden position
Der har været lejlighedsvist brusebadet	Beskyt klæbepuden, når du bader og bruser med f.eks. en plastikpose
Mekanisk tryk på huden/klæbepuden	Kontroller, at slangen / røret, tøjet eller underlaget ikke gnider mod klæbepuden
Patienten sveder unormalt. Der er høj luftfugtighed. Fugt kan reducere pudens klæbeevne	Placer ny pude
Røret er fastgjort over en bevægelig kropsdel, f.eks. en samling	Flyt klæbepuden til en "ikke bevægelig" position
Meget eller langt kropshår under klæbepuden	Fastgør klæbepuden f.eks. på indersiden af armen i stedet for ydersiden. Barber området under klæbepuden

Ved anvendelse

Kontroller, at huden er tør

Brug ikke blødgørende creme på huden, hvor Tube-flexi skal fastgøres

Kropsbeholdning fjernes ved barbering hvis det er muligt

Hold den ene hånd over klæbepuden for at opvarme/forme klæbepuden, før slangen/tuben placeres