

Debrisoft®

Aktiv debridering



Sådan anvendes Debrisoft®

Indikationer

Med **Debrisoft®** har du en hurtig, effektiv og sikker måde at oprense/debridere overfladiske sår og sårømgivelser. Den er effektiv til at fjerne bløde fibrinbelægninger, bløde nekroser og til fjernelse af keratose.

Under oprensning/debridering binder **Debrisoft®** fibrin, eksudat, bakterier og keratoser.

- Trin 1** Åbn den sterile pakke med **Debrisoft®**
- Trin 2** **Debrisoft®** fugtes med NaCl eller rent vand
- Trin 3** Forsigtigt, med let pres, oprenses såret og sårømgivelser med den fugtede **Debrisoft®**. Anvend den bløde side.
- Trin 4** Den brugte **Debrisoft®** bortskaffes som vanlig affald.

Vigtigt!

Inden anvendelse af **Debrisoft®** blødgøres hårde nekroser og hårde fibrinbelægninger med f.eks. et gel produkt. **Debrisoft®** fugtes inden anvendelse. Den bløde side anvendes. Efter at såret er debrideret og rent vælges relevante sårbehandlings produkter.

Varenummer
31 222

Str.
10 x 10 cm

Pakning
Æske á 5 stk.



Lohmann & Rauscher A/S
Højnæsgaard
Gøngehusvej 252
DK-2950 Vedbæk
Tlf.: +45 45 89 02 25
Fax: +45 45 89 02 29
info@dk.LRmed.com
www.lohmann-rauscher.dk