



Lohmann & Rauscher


# “Åbner for muligheden af sårheling”



**Debrisoft® til oprensning af sår**

## Moderne behandling af sår


Anbefales af EWMA\*

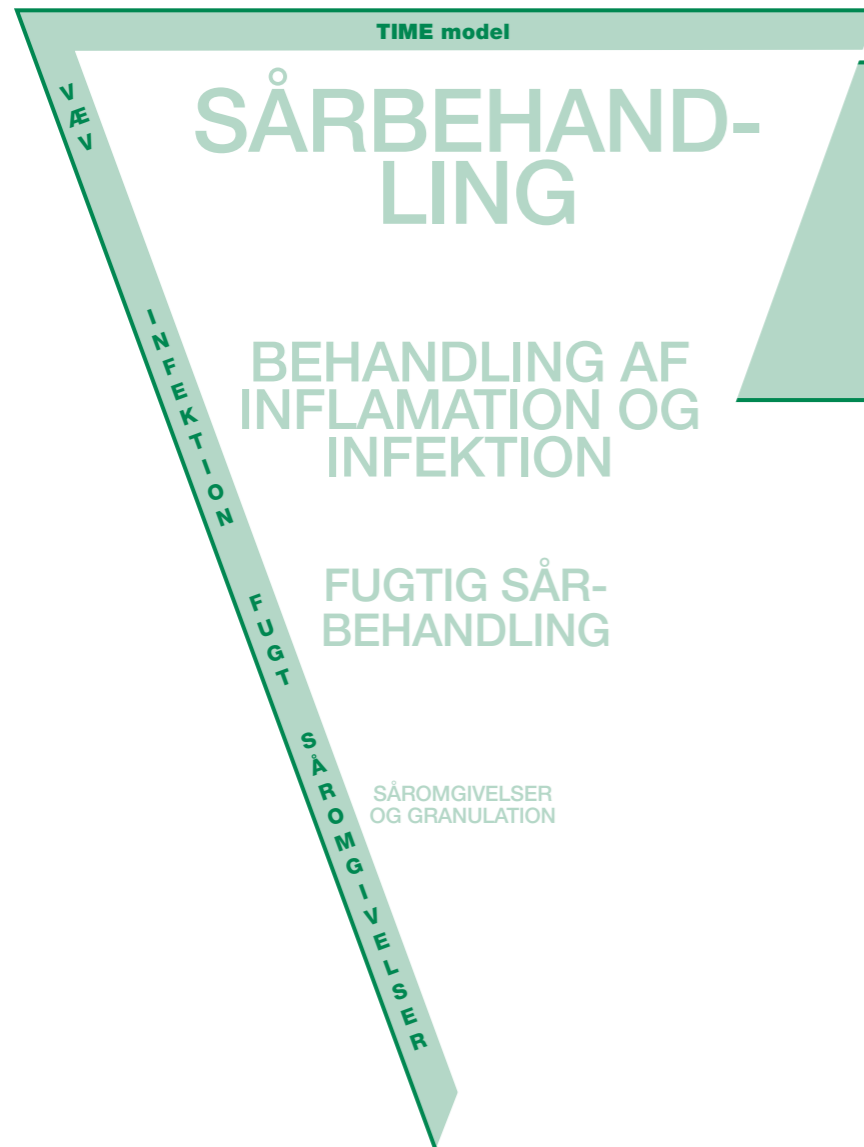

- Debridering**  
Forudsætning for heling af f.eks.
- Tryksår
  - Venøse og arterielle bensår
  - Diabetiske fodsår


## Debridering, det første vigtige skridt.

- Fjernelse af fibrin/slough, snavs og keratoser
- Reducering af bakterievækst
- Stimulerer sårhelingen

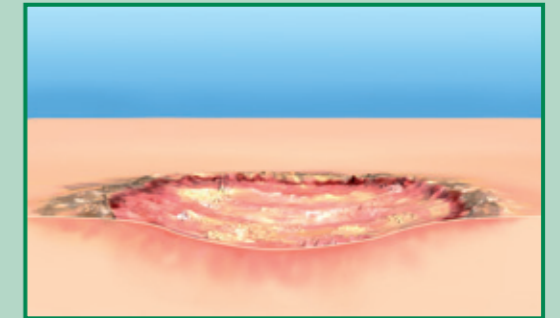

“Kun et rent sår kan hele.”

Et rent sår er en nødvendighed, for at mange moderne sårplejeprodukter kan fungere optimalt.

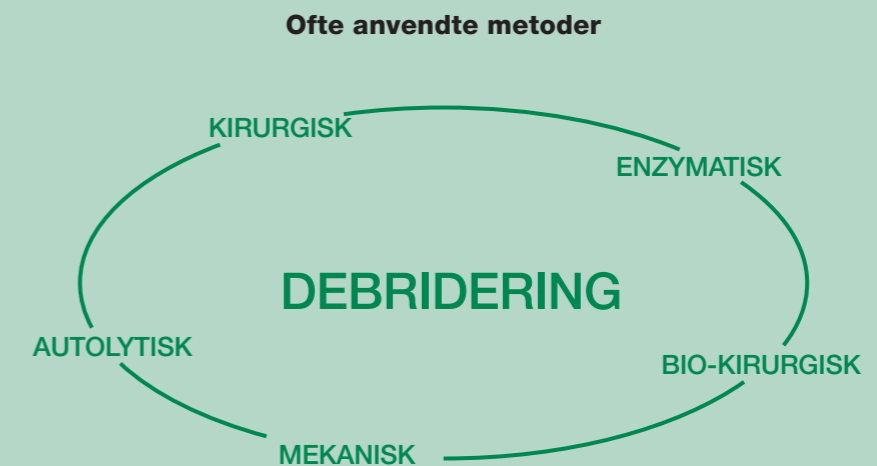

“Hver af disse metoder har styrker og svagheder. Der findes ikke en hurtig og sikker metode, der samtidig er effektiv.”

\* European Wound Management Association (EWMA). Position Document: Wound Bed Preparation in Practice. London: MEP Ltd, 2004.




Lohmann & Rauscher

Debrisoft®

NYHED



fibre technology

ACTITOP

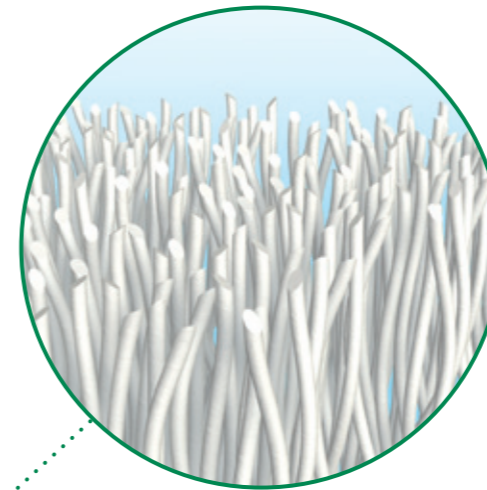


**Unikke, højteknologiske polyesterfibre**

- 18 millioner fibre på 10 x 10 cm
- Toppen af fibre er klippet i en speciel vinkel

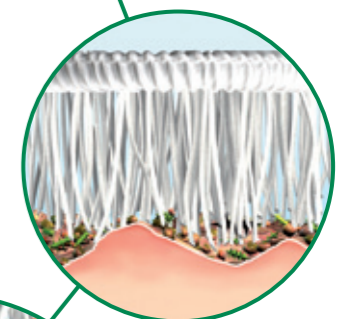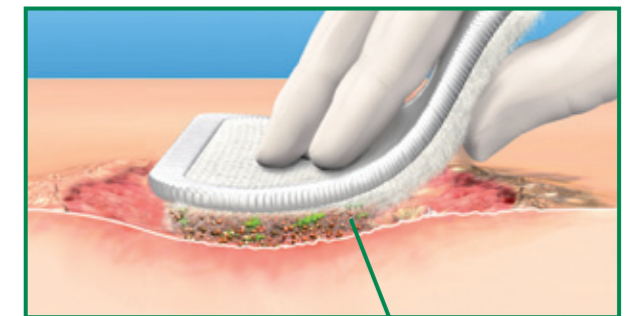

**Unik virkemåde**

- De fleksible fibre når alle områder i det ujævne sår
- Toppen af fibre løsner rester og fjerner fibrin og snavs fra såret
- Døde hudceller og keratoser fjernes meget let fra såromgivelserne
- Fibersammensætningen absorberer og binder de løsnede belægninger og keratoser

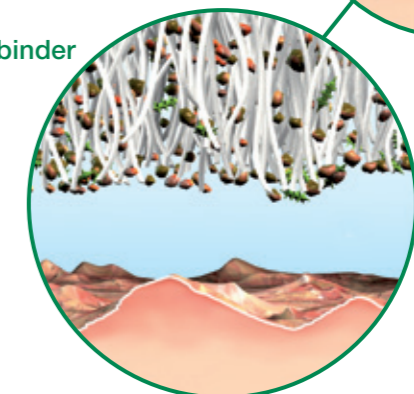


**Unik kvalitet**

- Særligt fiber- og produktdesign giver meget effektive resultater
- Kraftig og blød fibersammensætning gør den nænsom i brug
- Syet kant og forstærket bagside gør den let at anvende

**Debrisoft®** **NYHED**  
**Hurtigt synlige resultater**



Sår før behandling

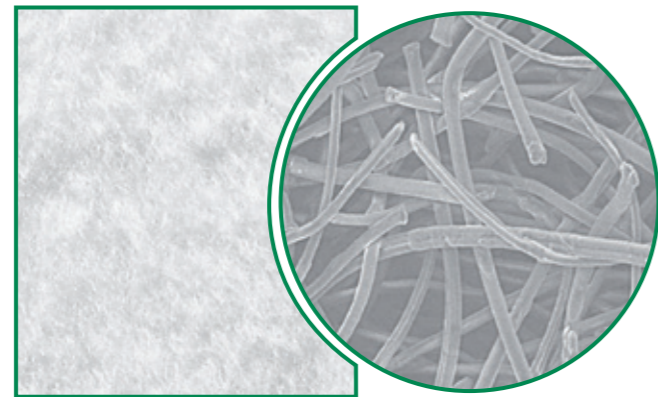


Debrisoft® før brug

2-4 minutter




Sår efter én behandling

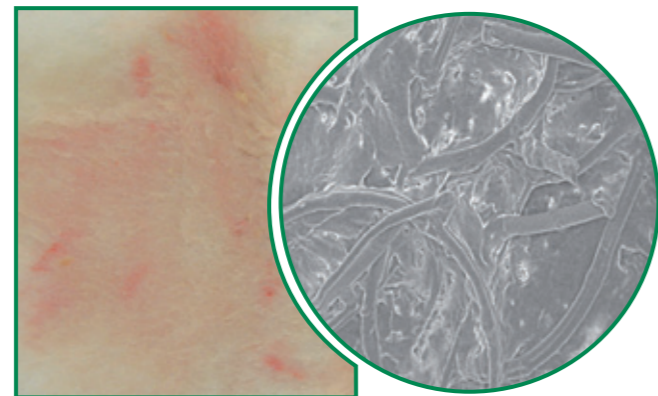

Debrisoft® efter brug



- Selektiv og sikker oprensning af fibrin og andre affaldsstoffer, samt døde hudceller og keratoser fra den omkringliggende hud
- Nyt granulationsvæv og nye epitelceller bliver beskyttet

**Debrisoft®** **NYHED**  
**En nyhed, der gør hverdagen lettere**

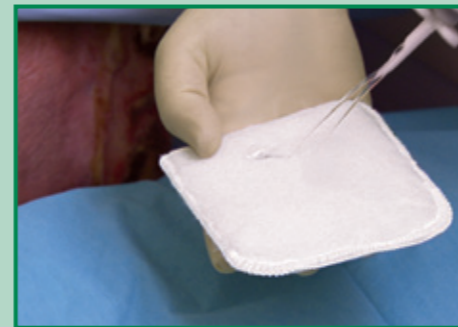

Let at klargøre –  
 Let at anvende

- Behagelig, blød overflade – som patienten vil sætte pris på
- Hurtig og let at bruge
- Mindre tidsforbrug for dig, færre smerter for din patient

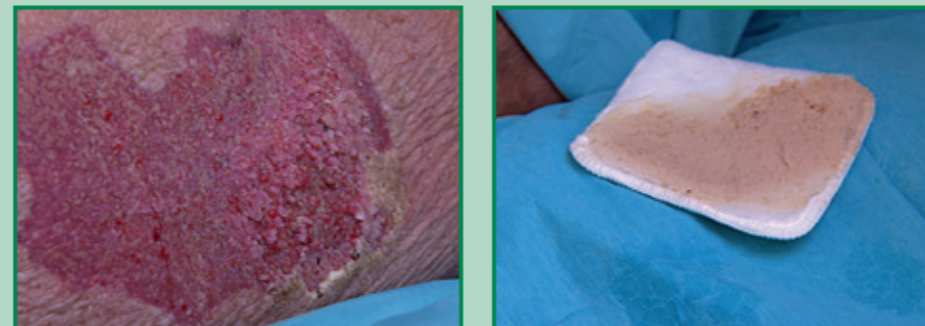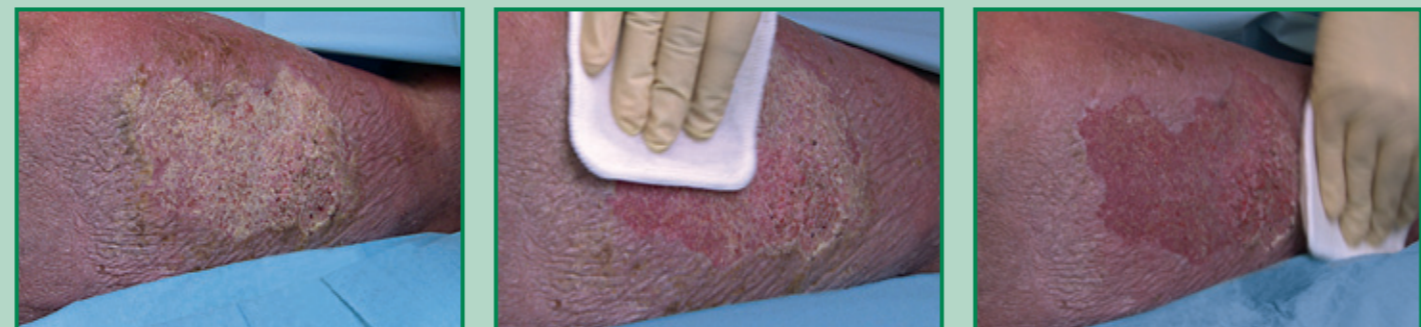

“Blød og patientvenlig”


**97,4 %** af patienter føler ingen smerter eller bivirkninger efter behandling.\*



- Fjerner patienters frygt for debridering
- Beroliger familiemedlemmer
- Forøger accepten fra de involverede parter

\* Tilgængelige data

## “Sårbehandling med Debrisoft® – en metode, der imponerer.”


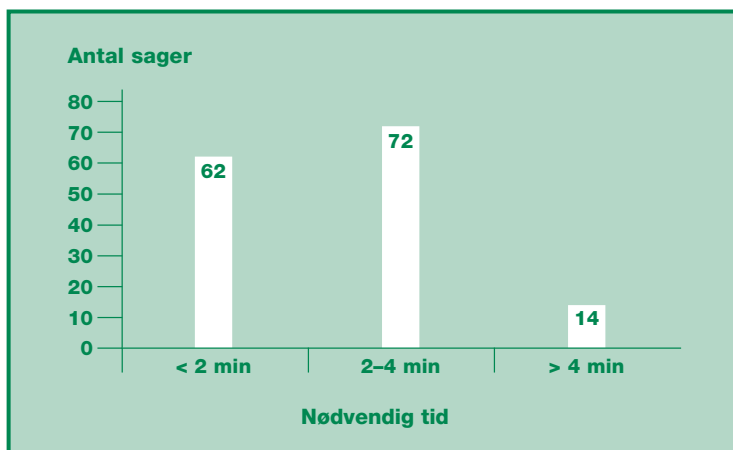


### Hurtigere behandling

Generelt tager sårbehandling med Debrisoft® ikke mere end 2 til 4 minutter.\*

### Let at anvende

På en skala fra “Fantastisk” til “Utilfredsstillende” blev debrideringsprocessens enkelthed vurderet til “God” eller “Fantastisk” i 145 (95%) af de 152 dokumenterede sager.\*

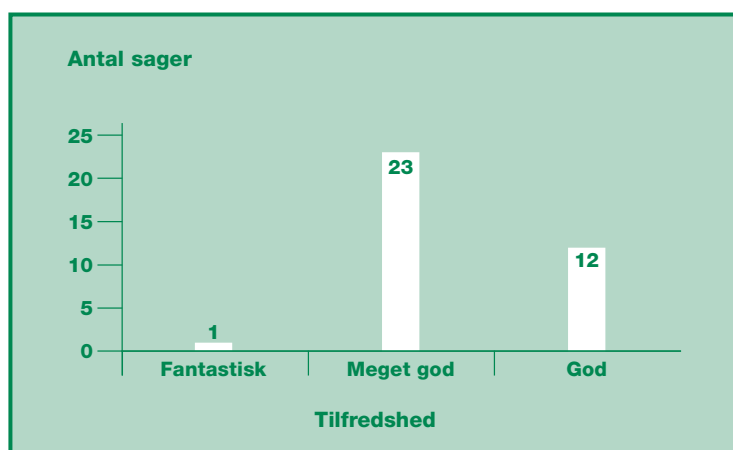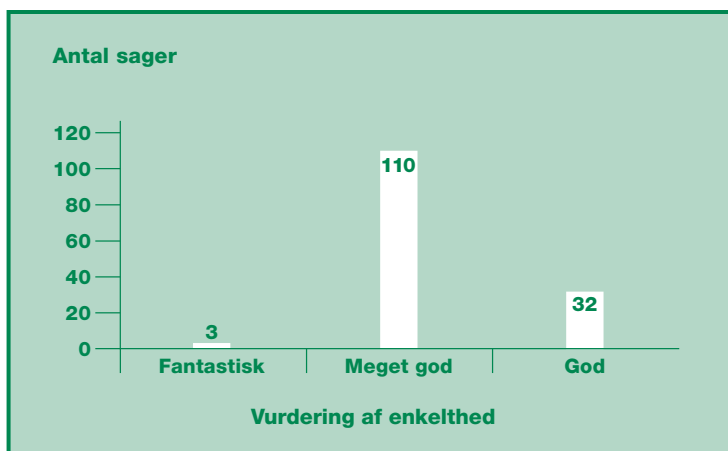

### Stor brugertilfredshed

36 (88%) af de 41 forsøgsparticipanter vurderede deres tilfredshed til “God” eller “Fantastisk” på en skala med seks niveauer.\*

\* Tilgængelige data



Lohmann & Rauscher

## Debrisoft®.

# Den nye smarte måde at debridere på.

Kan bruges med alle  
gængse renseopløsninger

Hurtigt

Binder snavs  
osv.

“Stor patientaccept og  
brugertilfredshed.”



Effektivt

Nænsom/Blød

Sikker og let at  
bruge

Tolereres godt

### Debrisoft®

Str. (cm)	REF	CNK (BE)	PIP CODE (UK)	PU (stk.)
Steril, pakket individuelt				
10 x 10	31 222	2749711	358-1287	5/50