

Pirutech.com

Brugervejledning til Pirucare

Tillykke med din nye Pirucare, der er et værktøj til udprækning af piller, tabletter og kapsler fra blisterpakninger. Før Pirucare tages i brug første gang, bør du læse nedenstående brugervejledning grundigt. Det vil sikre, at du får størst mulig gavn af dit nye hjælpemiddel.

Denne vejledning gælder Pirucare med tilhørende oplader og engangstragte.



Anvendelsesområde

Pirucare er designet udelukkende til udprækning af piller, tabletter og kapsler fra blisterpakninger. Hvis Pirucare anvendes til andre formål, kan det forårsage personskade og beskadige din Pirucare. Anvendelse af andet tilbehør end det udstyr, der medfølger og er beskrevet i vejledningen, kan forårsage personskade og beskadige din Pirucare.

Kontroller omhyggeligt din Pirucare for fejl og mangler, inden den tages i brug. Kontroller for brud på enkeltdele eller andet, der kan påvirke apparatets funktioner. Hvis Pirucare er behæftet med fejl, mangler eller skader, eller hvis den ikke virker efter hensigten, skal dette meddeles til Pirutech ApS. Du finder adressen sidst i denne vejledning.

Sådan anvender du Pirucare

Pirucare er designet til udprækning af piller, tabletter og kapsler fra blisterpakninger.

For at den enkelte pille, tablet eller kapsel lander det korrekte sted, f.eks. i en doseringsæske, påsættes den medfølgende tragt på undersiden af Pirucare.

Dette gøres ved at føre tragten hen til udkæringen i bundfladen på din Pirucare, således at tappen på tragten anbringes i den tilhørende fordybning på Pirucare.

Du aktiverer din Pirucare ved hjælp af en af de to betjeningsknapper på apparatets overside. Knapperne er placeret i henholdsvis højre og venstre side af apparatet, så det problemfrit kan benyttes af både højre- og venstrehådede brugere. Ved et let tryk på knappen aktiveres stemplet, der efterfølgende udprækker en pille, tablet eller kapsel.

1. Anbring Pirucare i din højre eller venstre hånd
2. Før blisterpakken ind i apparatet og placer den således, at den pille, der ønskes frigjort, ligger under stemplet, som trykker pillen ned og ud af blisterpakken.
3. Pirucare aktiveres ved et let tryk med tommelfingeren på en af de to knapper på oversiden



Pirucare må kun anvendes til udprækning af piller og kun sammen med en godkendt tragt. Valg af tragt bør ske under hensyntagen til både pillens og den enkelte blisters størrelse og udformning.

For at undgå kontaminering er det vigtigt, at der skiftes tragt, når du skifter fra udprækningen af én pilletype til en anden. Det er ligeledes vigtigt, at du skifter tragten, når du går fra dosering af én patient til en anden.

Daglig vedligeholdelse

For at undgå tekniske problemer og unødvendige reparationer er det vigtigt, at Pirucare holdes ren og tør. Apparatet bør efter anvendelse tørres af med en blød klud for at fjerne snavs og fugt. Pirucare tåler rengøring med spritholdig klud.

Eventuelle fejl og tekniske problemer skal meddeles til Pirutech ApS. Du finder adressen sidst i denne vejledning.

Opladning

Brug kun den medfølgende oplader til opladning af din Pirucare og kun i et tørt miljø.

Sæt først opladeren i en stikkontakt med 240 V og forbind den dernæst med din Pirucare.

Opladning til fuld styrke tager normalt ca. 14 timer. Det er muligt at bruge din Pirucare under opladning.

Får du brug for at oplade din Pirucare i områder, hvor opladeren ikke passer i stikkontakten, skal du anvende en godkendt adapter. Tjek spændingen, inden du forbinder.

Før du anvender Pirucare første gang, skal batterierne være fuldt opladede.

Sikkerhedsinstruktioner

Ved brug af genopladeligt udstyr skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, således at risikoen for brand, lækkende batterier samt person- og materialeskader begrænses.

- Pirucare må kun oplades med den tilhørende oplader
- Opladeren må kun tilsluttes 240 V vekselstrøm
- Afbryd altid strømmen, inden opladeren tages ud af stikkontakten
- Fjern altid opladeren fra stikkontakten ved forstyrrelser under eller efter brug samt før rengøring
- Pirucare er ikke legetøj. Opbevar derfor altid apparatet uden for børns rækkevidde
- Pirucare er kun til brug inden døre og bør ikke anvendes i fugtige og våde områder
- Anvend kun de til Pirucare godkendte og tilhørende tragte
- Læg ikke Pirucare i vand eller andre væsker, da det kan skade apparatets elektriske kredsløb
- Pirucare tåler ikke slag og stød, længerevarende frost eller varmpåvirkninger over 50°C
- Læg ikke Pirucare i direkte sollys eller varme
- Efterse altid Pirucare, oplader, ledning og stik for beskadigelser og fejl før brug
- Benyttes Pirucare til et andet formål end det egentlige, eller betjenes Pirucare ikke i henhold til brugsvejledningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følgevirkninger. Skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten
- Forsøg ikke selv at åbne Pirucare, da garantien derved bortfalder

Reparation

Hvis der opstår problemer med Pirucare, eller apparatet går i stykker, skal det efterses af Pirutech Aps. Det samme gælder, hvis din Pirucare behøver service.

I tilfælde af tekniske problemer eller fejl og mangler skal du indsende din Pirucare til Pirutechs serviceenhed med en detaljeret beskrivelse af fejlen. Du finder adressen sidst i denne brugsvejledning.

Bortskaffelse

Når din Pirucare er udtjent, bør du tænke på miljøet. Pirucare indeholder stoffer, der kan være skadelige for miljøet, hvis den ikke bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. Pirucare er et elektronisk apparat, og du må derfor ikke smide den i skraldespanden sammen med dit almindelige affald, man skal aflevere den på et godkendt opsamlingssted, f.eks. din lokale genbrugsstation. De tilhørende tragte kan i forbindelse med udprikning af piller have været i berøring med kemikalier, derfor bør disse bortskaffes under hensynstagen til dette.

Tekniske data og bekendtgørelser

- Højde: 4,5 cm i bagstykket og 3,9 cm i spidsen
- Bredde: 13,7 cm på det bredeste sted
- Længde: 8,8 cm fra håndfladen og ud til tragten
- Materiale: Plast
- Farve: Grå
- Vægt: 236 g
- Strømforsyning: 230V~ /50 Hz / 15 VA
- Opladningsstrøm: 800mA
- Opladningsspænding: 6V
- Opladningstid: 14 timer
- Batterier: Nikkel Metal Hydride (Ni-MH)

The logo for Pirutech features a thin, dark grey curved line that starts on the left side, loops upwards and then downwards, ending under the 'P' of the word 'Pirutech'. The word 'Pirutech' is written in a large, bold, black sans-serif font. Below the word, the text '.com' is written in a smaller, black sans-serif font.

Pirutech
.com