

PRODUKTDATABLAD

STERIKING® Latex-fri tape til dampautoklaving

STERIKING®-tape er beregnet til lukning af indpakkingsmaterialer til dampsterilisation i sundhedssektoren. Velegnet til tungere papirbaserede emballeringsmaterialer, SMS og nonwoven.

Overholdelse af internationale standarder

STERIKING®-indikator-tape til dampautoklaving overholder den internationale standard: ISO 11140-1:2014 (type 1, procesindikatorer).

STERIKING® produkter er designet, valideret og fremstillet, så de opfylder de tilsigtede formål. Renhedsgraden opfylder kravene i DS/EN ISO 13485



Tekniske data og ydeevnekaraktistika

STERIKING®-tape til dampautoklaving med dampindikator er fremstillet af kraftigt imprægneret semi-crepepapir, der er trykt med blyfrit dampblæk. Tapen indeholder ikke latex, opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

Dampindikatorblækket reagerer positivt, når det udsættes for varme og fugt i dampautoklaven. Efter sterilisation vises der brune streger på bagsiden. De normale tid/temperatur-kombinationer er 3 minutter ved 134 °C eller 15 minutter ved 121 °C.

PRODUKTDATABLAD

STERIKING® Latex-fri tape til dampautoklavering

Produktspecifikation

Egenskab	Enheder	Typisk værdi
Bredde:	mm	Nominel ± 1
Tykkelse:	µ	140
Vedhæftning til stål:	N/25 mm	19
Brudstyrke:	N/25 mm	87
Forlængelse:	%	7
Farve:		Natur, indikator-tape med trykte grønne striber

Opbevaringsanbefalinger og holdbarhed

Det anbefales, at STERIKING®-produkterne opbevares i de originale, lukkede transportkasser og i tørre og rene omgivelser, der er beskyttet mod direkte sollys og overdreven fugt og varme.

Hvis STERIKING®-tape til dampautoklavering opbevares i overensstemmelse med anvisningerne, er holdbarheden mindst 3 år fra fremstillingsdatoen.

Salgs- og transportemballage

STERIKING®-tape til dampautoklavering er pakket i genanvendelige, brune kasser af hårdt pap. Som indvendig beskyttelse mod fugt og støv er dampindikator-tapen emballeret i et genanvendeligt HD-polyethylen, hvilket betyder at barriersystemet er i overensstemmelse med kravene i Det Medicinske Direktiv 93/42/EØF, seneste gældende version.

Mærkning: Alle kasser har en mærkat med de nødvendige oplysninger om/anvisninger for indholdet i overensstemmelse med ISO 11140-1:2014.

I tilfælde af klage

I tilfælde af en klage skal klageren levere lot.nummeret og identifikationskoden. For at gøre det muligt at evaluere det produkt, som klagen vedrører, skal klageren levere et af de defekte produkter (eller et digitalt billede) og en beskrivelse af fejlen sammen med et ubrugt produkt til Mediq Danmark.

STERIKING® er et registreret varemærke tilhørende Wipak Oy

PRODUKTDATABLAD

STERIKING® Latex-fri tape til dampautoklaving

Mediq varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0103524	Steriking	autoklavetape hvid m. indikator, latexfri	25 mm x 50 m	krt a 36 rl	ITS25GL
0103525	Steriking	autoklavetape hvid m. indikator, latexfri	19 mm x 50 m	krt a 48 rl	ITS19GL

Denne specifikation vedrører den navngivne produktgruppe og gælder indtil den næste revision. Andre produktrelaterede dokumenter kan rekvireres.

Oplysningerne i nærværende dokument er efter vores overbevisning nøjagtige og pålidelige på udgivelsesdatoen. Wipak giver ingen yderligere garantier og fremsætter ingen erklæringer angående nøjagtigheden eller fuldkommenheden af oplysningerne i nærværende dokument og påtager sig intet ansvar for konsekvenserne af brugen af det eller for trykfejl. Det er kundens ansvar at inspicere og teste vores produkter for at forsikre sig selv om, at produkterne er egnede til kundens særlige formål og til de faktiske forhold, som produktet bliver udsat for. Kunden er også ansvarlig for korrekt, sikker og lovlig brug, behandling og håndtering af vores produkter, især hvor der er angivet anbefalinger for sikker brug og opbevaring. Intet heri udgør en garanti, og der kan ikke udledes noget om beskyttelse fra nogen lovgivning eller patent.

STERIKING® er et registreret varemærke tilhørende Wipak

