

PRODUKTDATABLAD

Urin Monovette, gul, uden stabilisator

Monovette urintest

Monovette urintest er en nem og hygiejnisk løsning til urinprøver. Monovette fungerer i princippet som en almindelig sprøjte. Prøven trækkes op i prøverøret, hvorefter ansatsen fjernes og prøven lukkes med beskyttelseshætte.

Hvis prøven skal centrifugeres, knækkes stempelpinden af, hvorefter Urin Monovetten kan placeres direkte i de fleste typer centrifuger.

Urin Monovetten findes også med tilsat stabilisator (155 mg borsyre) så prøven stabiliseres i op til 48 timer uden at skulle på køl.

For urinalyse, centrifuger 400 x g/ 5 min. Ved 20°C.

Kan opsuge fra alle typer bægre og glas.



Indholdsstoffer/materiale:	PP, HDPE
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IVD
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og ved stuetemperatur
Holdbarhed:	36 måneder fra produktionsdato
Bortskaffelse vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Urin Monovette, gul, uden stabilisator

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0832005	Urintest	Urin Monovette, gul, uden stabilisator	10 ml	Pk. a 64 – Krt. a 8 pk.	10252