

PRODUKTDATABLAD

PolyMem Silver skumbandager uden klæb, steril

PolyMem Multifunktionel sårbandage tilsat sølv er designet til aktivt at fremme heling af inficerede sår samt lindre smerte.

Består foruden mikroskopiske sølvpartikler af en matrix med en sårrensende surfaktant, fugtgivende glycerin, superabsorberende stivelse samt en semipermeabel filmoverside. Sølvet aktiveres i takt med, at bandagen bliver fugtig og absorberer sårveske, debris og bakterier. Sølvet virker kun i bandagen og bliver således ikke frigivet til sårbunden, hvorved nye celler beskyttes mod sølvets toksiske effekt, og sår/væv misfarves ikke af sølv. Kan således anvendes til alle, der tåler sølv, herunder nyfødte og spædbørn.

Velegnet til sår med let til moderat sekretion.

Bør appliceres mindst 2–3 cm ud over sårkanten og skiftes inden sårsekret når sårkanten.

Bør ikke kombineres med produkter under, da det vil hæmme PolyMem's effekt.

Fikses med passende fiksering. Ved fiksering med klæb, da kun i kanten.

Kan tilklippes. Kan sidde i op til 7 dage, såfremt sårets tilstand tillader det.



PRODUKTDATABLAD

PolyMem Silver skumbandager uden klæb, steril

Indholdsstoffer:	Polyurethan matrix, polyurethanfilm, surfactant, glycerin, Co-polymer stivelse, sølvpartikler.
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE IIb
Steril vare:	Ja
Holdbarhed:	5år
Opbevaring:	Stuetemperatur, tørt og udenfor direkte sollys
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Særlig mærkning:	Nej

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4279950	PolyMem Silver	skumbandage med sølv, uden klæber, steril	10,8 cm x 10,8cm	æske a 15 stk - krt a 2 æsker	1044
4279951	PolyMem Silver	skumbandage med sølv, uden klæber, steril	10,8 cm x 32 cm	æske a 12 stk	1124
4279952	PolyMem Silver	skumbandage med sølv, uden klæber, steril	17 cm x 19 cm	æske a 15 stk	1077