

PRODUKTDATABLAD

Bactiguard Wound Care, sårskyllevæske og gel

Bactiguard sårskyllevæske er et sårvaske- og rensmiddel til akutte og kroniske sår, såsom tryksår i stadie I-IV, venøse sår, diabetiske sår, postoperative sår og forbrændinger (1. - 2. grad).

Væsken medvirker til at holde såret fugtig og til at modvirke dårlig lugt. Væsken har antimikrobielle egenskaber og har vist sig effektiv mod fjernelse af biofilm.

Bactiguard renser, reducerer mikrobiel belastning og understøtter den naturlige heling. Fjerner biofilm og modvirker dårlig lugt fra såret. Det aktive stof hypoklorsyre (HOCl), er det samme stof, som kroppens immunceller bruger til at bekæmpe infektioner.

Kan anvendes sammen med NPWT.

Væsken skal ikke blandes eller fortyndes, ej heller skylles bort.

Bactiguard sårgel på tube fugter og debriderer akutte og kroniske sår, såsom tryksår i stadie I-IV, venøse sår, diabetiske sår, postoperative sår og forbrændinger (1. - 2. grad).

KONTRAINDIKATIONER Bactiguard Wound Care gel må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for nogen af præparatets indholdsstoffer.

Bør ikke anvendes sammen med sølvholdige produkter.

Holdbarhed efter åbning 30 dage



PRODUKTDATABLAD

Bactiguard Wound Care, sårskyllevæske og gel

Indholdsstoffer/materiale: **Væske:** Hypoclorosyre, natriumhypochlorit, rensset vand.
Gel: Sodium hypochlorid, rensset vand, lithium magnesium sodium silicate.

PVC/ftalater: Nej/nej

Latex: Nej

CE klassifikation: **Gel:** klasse IIb, **væske:** klasse III

Steril: Baseret på intern bioburden-test og verifikation i henhold til US pharmacopeia part 51, Antimicrobial Effectiveness Testing, er det vist, at der ikke vil forekomme mikrobiel indtrængen og/eller spredning af bakterier i Bactiguard Hydrocyn.

Opbevaring: Stuetemperatur, tørt - væk fra direkte sollys/ekstreme vejrforhold i den originale beholder

Holdbarhed fra produktionsdato: **Gel:** 18 måneder
Væske: 24 måneder

Bortskaffelse af vare:

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Ref. nr.
5012004	Bactiguard wound care	Antimikrobiel sårskyllevæske, m. spray	100 ml	BW3CE700
5012005	Bactiguard wound care	Antimikrobiel sårskyllevæske m. spray	250 ml	BW34E700
5012006	Bactiguard wound care	Antimikrobiel sårskyllevæske u. spray	250 ml	BW34E100
5012007	Bactiguard wound care	Antimikrobiel sårskyllevæske u. spray	500 ml	BW35D100
5012008	Bactiguard wound care	Antimikrobiel sårskyllevæske u. spray	1000 ml	BW36D100
5012009	Bactiguard wound care	Antimikrobiel sårgel, tube	15 g	BW40F900
5012010	Bactiguard wound care	Antimikrobiel sårgel, tube	50 g	BW42C900
5012011	Bactiguard wound care	Antimikrobiel sårgel, tube	100 g	BW4CB900
5012012	Bactiguard wound care	Antimikrobiel sårgel, spray	50 g	BW42E800
5012013	Bactiguard wound care	Antimikrobiel sårgel, spray	100 g	BW4CG800

PRODUKTDATBLAD

Bactiguard Wound Care, sårskyllevæske og gel

5012014	Bactiguard wound care	Antimikrobiel sårskyllevæske, pose til ophæng	500 ml	HW35C102
5012015	Bactiguard wound care	Antimikrobiel sårskyllevæske, pose til ophæng	1000 ml	HW36C102