


# PRODUKTDATABLAD

## BD AutoShield Duo penkanyle

BD AutoShield nålen er en engangsnål med en sikkerhedsforanstaltning således, at det er muligt at håndtere penkanylen uden at komme i kontakt med selve kanylen, og derved undgå stikskader hos plejepersonalet. Nålen kommer automatisk frem under injektionen. Så snart nålen fjernes fra injektionsstedet glider et skjold automatisk tilbage som låser og sikrer nålen. Nålen kan herefter fjernes uden frygt for eventuelle stikuheld og er derfor fremragende til professionelt brug, på sygehuse, plejehjem eller i hjemmeplejen. Nålen er sikret mod at kunne bruges mere end en gang. Penkanylen er egnet for personer med nåleskræk.

Penkanylen skal anvendes sammen med en insulinpen. Kanylen skrues på insulinpennen. Passer til gængse insulinpenn.

Penkanylen er steril. Den del af nålen som går igennem patientens hud er coatet med silikone på hele overfladen, for at lette indtrængen i huden og minimere vævsskader.

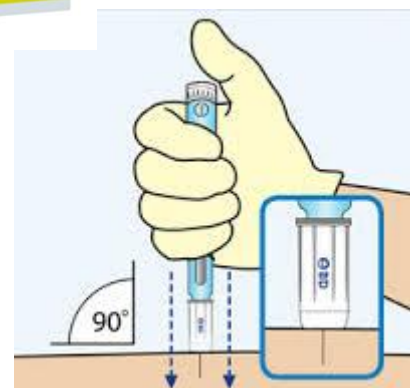

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	NA
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ja/Medicinsk class IIa
<b>Steril vare/metode:</b>	Ja/Gammastråling
<b>Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt og stuetemperatur
<b>Holdbarhed fra produktionen:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale regler – kanylebøtte
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Følg lokale regler

# PRODUKTDATABLAD

## BD Autosshield Duo penkanyle

<b>Tæt gevind, når skrues på insulinpen:</b>	Ja
<b>Passer på gængse insulinpenne:</b>	Ja
<b>Batchnummer:</b>	Ja
<b>Dansk mærkning på emballagen:</b>	Ja
<b>Dansk brugsanvisning:</b>	Ja
<b>Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:</b>	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Engangsbrug

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
3080120	329605	BD Autosshield Duo penkanyle	5 mm x 0,3 mm (30G)	æske a 100 stk.
3080121	329608	BD Autosshield Duo penkanyle	8 mm x 0,33 mm (30G)	æske a 100 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.