

UCS® Debridement

Debridering af sår og sårømgivelser

Hvad er UCS® Debridement?

UCS® Debridement er en effektiv debrideringsklud der er tilsat en surfactant for at lette den mekaniske oprensning af såret, således at oprensning er smertefri for patienten og uden at ødelægge granulationsvævet. Ved oprensning med UCS efterlades ingen rester i såret. UCS er pakket sterilt, enkeltvis og klar til brug ved åbning.

Egenskaber

- Ressourcebesparende
- Enkel og let at anvende
- Atraumatisk fjernelse af fibrin, nekrotisk, dødt væv, hyperkeratose og biofilm
- Effektiv debridering, uden at skade granulationsvævet.
- Lugtreduktion
- Tilfører fugt til sår og sårømgivelser
- Reducerer smerte, øger patient compliance
- Øger iltningen af vævet, og fremmer helingsprocessen

Tips and Tricks

- Ved genstridigt og hårdt fibrin, indtørret blod eller hyperkeratose, kan man med fordel vride lidt væske ud af kluden, og lade det virke i et par minutter.
- Kluden kan også lægges hen over det område, hvor man ønsker at debridere. Lad kluden ligge i et par minutter, så overfladen løsnes enkelt og smertefrit.
- Kluden kan foldes, så hele kluden udnyttes. Den ene side af kluden er mere ru end den anden. Det giver mulighed for at tilpasse debrideringen til den givne situation.
- Når såret er debrideret, anvendes kluden på huden omkring de omkringliggende hudømgivelser



Step by step



1 Pakken åbnes. Den er præfugtet og klar til brug.



2 Kluden foldes og bevæges i cirkulære bevægelser.



3 De fine fibre i kluden løsner, fjerner og opsamler fibrin, biofilm mm.



4 Anvend til sidst kluden på sårømgivelserne

Vil du se mere



www.medi.biz/ucs

Formål: Sterilt system til akut og gentagen sårdebridering. Oprensning og hydrering af såret samt sårømgivelserne.