

SIGVARIS

Doff N'Donner Rengøringsvejledning

Ved individuelle brugere

Synligt snavs fjernes med f.eks. en fugtig engangsklud. Brug metoden med plastikposen ned over keglen til at rense muffen med, men anvend sæbevand, da desinfektionsmidlerne ofte er for skræppe til muffen på den omtalte måde.

Ved flere brugere

Synligt snavs fjernes med f.eks. en fugtig engangsklud. Derefter aftørres Doff n' Donner (både muffe og kegle) grundigt med en klud gennemfugtet med et overfladedesinfektionsmiddel. Bortkast kluden efter brug.

Vi anbefaler f.eks. til desinfektion

7287560 WipeClean, universal cleaning small, 20x30 cm.
Ved særlig risiko for smitte kan anvendes 7287564 Wipeclean alco free desinfektion small, 20x30 cm.

Vær opmærksom på, at Doff n' Donner bør opbevares ved stuetemperatur uden påvirkning fra direkte varmekilder eller sollys.

September 2019

