


Clinitek Status+®

hCG betjeningsvejledning

www.siemens.dk/diagnostics

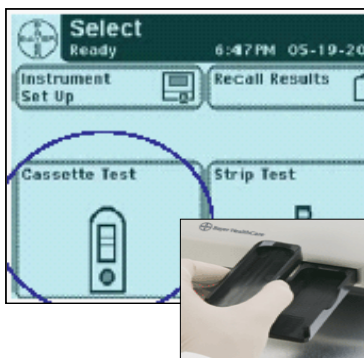


- Urinprøven skal have stuetemperatur
- Vælg **Cassette Test** på skærmen
- Tryk på **Enter New Patient**
- Indtast CPR nr. eller navn og tryk **Enter**
- Tryk **Clinitek hCG cassette** og vend slædeindsatsen
- Tag hCG kassette og pipette ud af folien og placer kassetten i indsatsen



Indenfor 8 sekunder udføres følgende:

- Tryk **START**
- Opsug urin ved at trykke på den øverste pipettebold
Overskydende urin løber over i overløbskammeret
- Tøm urinen ud i prøvebrønden ved at trykke på den øverste pipettebold én gang
Overskydende urin skal blive i overløbskammeret

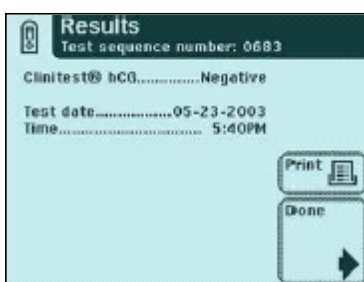

- Apparatet aflæser kassetten og tæller ned
- Resultatet udskrives og vises på skærmen
- Tryk **DONE** på skærmen for at komme tilbage til start
- Kassetten kasseres og slædeindsatsen vendes evt.

Fortolkning af resultater

Positiv: Testområdet har en koncentration af hCG ≥ 25 mIU/ml.

Borderline: Testområdet har en koncentration af hCG, der ligger i området 5 - 25 mIU/ml. Ny prøve udbedes indenfor 48-72 timer.

Negativ: Testområdet har en koncentration af hCG < 5 mIU/ml

CE For fuld dokumentation henvises til:
Clinitek Status Brugervejledning
(132496 Rev B 2004-11)
Clinitek hCG indlægsseddel (32-6036-D)

SIEMENS