

Lynvejledning URYXXON® Relax

Urinalyse og daglig vedligeholdelse

Analysér friske urinprøver inden for to timer efter indsamling. Nedkølede urinprøver skal varmes op til stuetemperatur før test (15–30 °C).


Læs denne vejledning før udførelse af test. Følg instruktionerne omhyggeligt.



Trin 1: Tænd for aflæseren. Kontrollér, at strimmelholderen er ren.



Trin 2: Dyp teststrimmelen i urinprøven. Kontrollér, at alle testpuder er gennemvædede. Fjern teststrimmelen fra urinen efter ca. 1 sekund. Træk den længste kant af teststrimmelen langs siden af beholderen, så du sikrer, at overskydende urin fjernes. Benyt Medi-Test URYXXON® Stick 10/Combi 5 L teststrimler.

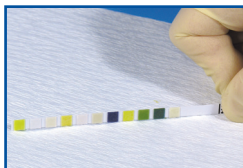

Trin 3: Lad en absorberende serviet opsuge overskydende urin ved at berøre kanten af strimmelen kortvarigt (ca. 1 sekund).



Trin 4: Placer teststrimmelen i strimmelholderen. Kontrollér at puderne vender opad. Instrumentet starter automatisk målingen. Teststrimmelen trækkes ind i instrumentet efter 30 sekunder. Vigtigt: Fjern ikke teststrimmelen fra strimmelholderen, før målingen er færdig.



Trin 5: Når målingen er fuldført, udskrives resultatet automatisk.



Trin 6: Kassér den brugte teststrimmel. Aftør eventuelle urinrester.

Daglig vedligeholdelse



Rengør strimmelholderen med vand og desinfektionsmiddel én gang dagligt.



1. Sluk instrumentet.
2. Træk i strimmelholderen for at fjerne den fra instrumentet.
3. Gennemskyl holderen med vand.
4. Fjern eventuelle krystalaflejringer med en blød børste.
5. Aftør strimmelholderen med 70 % sprit eller andre velegnede desinfektionsmidler. Aftør med en blød klud.
6. Isæt holderen i instrumentet ved at trykke den helt i bund.

Kvalitetskontrol

Test kontrol, når der åbnes en ny beholder med strimler. Benyt ikke vand som negativ kontrol.

Udskiftning af printerpapir



1. Åbn printerdækslet ved at trykke ned på knappen ved siden af printerens papirsprække. Fjern den gamle papirrulle.
2. Isæt den nye papirrulle, og udrul den nedenfra.
3. Udrul ca. 10 cm papir.
4. Luk dækslet.



Teknisk service

Hvis du har spørgsmål efter at have læst vejledningen, eller hvis du har behov for teknisk assistance, bedes du kontakte

Mediq Danmark A/S
Kormarksvej 15–19
DK-2605 Brøndby
DANMARK

Tlf: +45 3637 9110
Fax: +45 3641 4415

OPCO
P.O. Pedersensvej 14
DK-8200 Aarhus N
DANMARK

Tlf: +45 8640 7407
Fax: +45 8640 1836



Lynvejledning URYXXON® Relax

Resultattabel

Param.	CONV	SI	ARB
BLD (Blod)	NEG	NEG	NEG
	10 Ery/ μ l	10 Ery/ μ l	+
	50 Ery/ μ l	50 Ery/ μ l	++
	250 Ery/ μ l	250 Ery/ μ l	+++
UBG (Urobilinogen)	NORM	NORM	NORM
	2 mg/dl	35 μ mol/l	+
	4 mg/dl	70 μ mol/l	++
	8 mg/dl	140 μ mol/l	+++
	12 mg/dl	200 μ mol/l	++++
BIL (Bilirubin)	NEG	NEG	NEG
	1 mg/dl	17 μ mol/l	+
	2 mg/dl	35 μ mol/l	++
	4 mg/dl	70 μ mol/l	+++
PRO (Protein)	NEG	NEG	NEG
	Spor	Spor	Spor (+)
	30 mg/dl	0.3 g/l	++
	100 mg/dl	1 g/l	+++
	500 mg/dl	5 g/l	++++
NIT (Nitrit)	NEG	NEG	NEG
	POS	POS	+
KET (Keton)	NEG	NEG	NEG
	25 mg/dl	2.5 mmol/l	+
	100 mg/dl	10 mmol/l	++
	300 mg/dl	30 mmol/l	+++
GLU (Glukose)	NEG	NEG	NEG
	NORM	NORM	NORM
	50 mg/dl	2.8 mmol/l	+
	150 mg/dl	8.3 mmol/l	++
	> 500 mg/dl	> 27.8 mmol/l	+++
pH (pH verdi)	5	5	5
	6	6	6
	6.5	6.5	6.5
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
SG (Massefylde)	1.000	1.000	1.000
	1.005	1.005	1.005
	1.010	1.010	1.010
	1.015	1.015	1.015
	1.020	1.020	1.020
	1.025	1.025	1.025
	1.030	1.030	1.030
	1.030	1.030	1.030
LEU (Leukocyter)	NEG	NEG	NEG
	25 Leu/ μ l	25 Leu/ μ l	+
	75 Leu/ μ l	75 Leu/ μ l	++
	500 Leu/ μ l	500 Leu/ μ l	+++



Teknisk service

Hvis du har spørgsmål efter at have læst vejledningen, eller hvis du har behov for teknisk assistance, bedes du kontakte

Mediq Danmark A/S

Kormarksvej 15-19
DK-2605 Brøndby
DANMARK

Tlf: +45 3637 9110

Fax: +45 3641 4415

OPCO

P.O. Pedersensvej 14
DK-8200 Aarhus N
DANMARK

Tlf: +45 8640 7407

Fax: +45 8640 1836



www.mn-net.com

MACHERY-NAGEL

MACHERY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany
Tel.: +49 24 21 969-0 · Fax: +49 24 21 969-199 · info@mn-net.com

MACHERY-NAGEL

www.mn-net.com

