

PRODUKTDATABLAD

Accu-Chek® Mobile teststrimler

Test til brug sammen med Accu-Chek Mobile blodsukkerapparat, som har strimmelfri teknologi.

Let håndterlig kassette. Apparatet holder øje med udløbsdatoen på teststrimlerne.

Udløbsdato og opbevaringstemperatur står på emballagen.

Kan måle op til 4000 meter over havets overflade uden at resultatet påvirkes.



1. Åbn skydedækslet
2. Udtag en bloddråbe
3. Påfør blod
4. Aflæs resultatet, og luk skydedækslet



Måleområde:	Blodsukker: 0,6 – 33,3 mmol/l
Kodes/kalibreres:	Automatisk
Måletid:	5 sekunder
Blodmængde:	0,3 µl
Indholdsstoffer/materiale:	Mutationsvariant i quinoprotein glukosedehydrogenase, Pyrroloquinolinquinon, Bis-(2-hydroxyethyl)-(4-hydroximinocyclohexa-2,5-dienyliden)-ammoniumchlorid, fosformolybdænsyre, natriumsalt, Satbilisator.
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/Annex II, list B
Steril vare/metode:	Nej
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja

PRODUKTDATABLAD

Accu-Chek® Mobile teststrimler

Holdbarhed fra produktionen:	18 måneder
Holdbarhed teststrimler efter åbning:	Teststrimlerne kan holde sig i 90 dage efter ibrugtagning
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Blodet suges fra:	Båndet
Genopfyldning af teststrimmel:	Nej
Batchnummer:	Ja
Dansk mærkning på emballagen:	Ja
Dansk brugsanvisning:	Ja
Opbevaring for test:	Tørt og stuetemperatur, +2 °C til 30 °C
Måling skal foretages ved temperatur:	+10 °C til +40 °C
Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:	Ja
Særlig bemærkning:	Teststrimmel kan anvendes en gang
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
Teststrimler passer til følgende apparat:	6408374 Accu-Chek Mobile og 6408375 Accu-Chek Mobile Infrarød blodsukkerapparater

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6408372	05953740370	Accu-Chek Mobile teststrimler	æske a 50 stk.
6408376	05953758038	Accu-Chek Mobile teststrimler	æske a 100 stk.

* Henviser til producentens reference nr.