

Bilag 1: Ændring af indstillingerne og kalibrering af Urisys 1100

Følg nedenstående trin:

- 1) Sluk for instrumentet
- 2) Træk den gamle slæde ud (N4), og isæt den nye slæde i instrumentet (C)
- 3) Tænd for instrumentet
- 4) Fejlmeddelelsen "E9 Wrong Tray" vises på skærmen
- 5) Tryk på den blå "Enter" knap
- 6) Tryk på knappen (pilen) under "Menu"
- 7) Tryk på knappen (pilen) under "Setup 1"
- 8) Tryk på knappen (pilen) under "Strip"
- 9) Tryk på knappen (pilen) under "Type"
- 10) Tryk på knappen (pilen) under "C-10"
- 11) Kontroller, at "Strip Type" nu er angivet som COMBUR 10 UX
- 12) Tryk på den blå "Enter" knap for at bekræfte
- 13) Instrumentet beder automatisk om en kalibrering. På skærmen står: "REPEAT CALIBRATION!". Tryk på knappen (pilen) under "YES"
- 14) Placer kalibreringsstrimlen Control Test M i slæden med testfelterne opad (testfelterne må ikke berøres). Strimlen skal placeres min. 2 mm ind under klipsen øverst på slæden
- 15) Tryk på den blå "Enter" knap
- 16) Hvis kalibreringen er i orden, lagres resultatet med dato og klokkeslæt og udskrives
- 17) Tag kalibreringsstrimlen ud, og kassér den. Kalibreringsstrimler kan kun anvendes en gang
- 18) Instrumentet er nu klar til analysering af Combur¹⁰ Test UX teststrimler