

Draping instructions

# BARRIER® Ekstremitets- afdækning med Drisite® Plus



- Drisite® Plus' unikke væskehåndteringssystem giver høj absorption og væskekontrol
- Kritiske områder er forstærkede for øget absorption og væskekontrol
- Tredimensionelt design for at skabe et stort, beskyttet område for anæstesi
- Integrerede slangeholdere til organisering af instrumenter
- Væsketæt for at forebygge væskegennemtrængning og hjælpe med at beskytte mod infektion
- Hurtig, alt-i-en drapering

## Draperingsvejledning



1. Fold bordafdækningen ud og placér den under patientens ben.



2. Alternativ 1: Dæk benet med afdækningen med klæb og fiksér den med OP-tape.



3. Alternativ 2: Dæk benet med Stockinettet.



4. Fiksér med OP-tape.



5. Placér den foldede ekstremitetsafdækning over patientens fod med pilen pegende mod patientens krop.



6. Fold den ene side af afdækningen ud og giv den til den assisterende sygeplejerske. Løft patientens ben og træk ekstremitetsafdækningen op over patientens knæ. Fold afdækningens sider ud.



7. Ræk gennem den elastiske åbning, tag fat i patientens fod og træk afdækningen ned over foden.



8. Fold den øverste del af afdækningen ud over anæstesiøjlen.

Varenr.	Beskrivelse	Str. [cm]	Str. absorption [cm]	Pakning
60202	Ekstremitetssæt: 1 OP-tape 1 Ekstremitetsafdeling, hul 7 cm elastisk 1 Forstærket bordafdækning	9 × 49 230 × 315 150 × 190	75 × 190	7 / 14
60208	Ekstremitetssæt: 1 Forstærket assistancebordspose 4 Papirhåndklæder 1 Bordafdækning 1 Afdækning med klæb 2 OP-tape 1 Ekstremitetsafdeling, hul 7 cm elastisk 1 Forstærket bordafdækning	79 × 145 18 × 25 150 × 190 75 × 75 9 × 49 230 × 315 150 × 190	65 × 85 75 × 190 75 × 190	5/10
60209	Ekstremitetssæt: 1 Forstærket assistancebordspose 4 Papirhåndklæder 1 Bordafdækning 1 Stockinette, S 2 OP-tape 1 Ekstremitetsafdeling, hul 7 cm elastisk 1 Forstærket bordafdækning	79 × 145 18 × 25 150 × 190 22 × 75 9 × 49 230 × 315 150 × 190	65 × 85 75 × 190 75 × 190	5/10
60210	Ekstremitetsafdeling, hul 7 cm elastisk	250 × 315		9/18
60211	Ekstremitetsafdeling, hul 7 cm elastisk	200 × 300		11/22
60213	Ekstremitetsafdeling, hul 7 cm elastisk	230 × 315		10/20

Alt specificeret sætindhold er også tilgængeligt til inklusion i Mölnlycke® procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® procedurepakke komponenter	Str. [cm]
70210	Ekstremitetsafdeling, hul 7 cm elastisk	250 × 315
70211	Ekstremitetsafdeling, hul 7 cm elastisk	200 × 300
70213	Ekstremitetsafdeling, hul 7 cm elastisk	230 × 315

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke, Drisite og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0682005

**Mölnlycke®**