

RENGØRING OG DESINFEKTION AF MEDICINSK UDSTYR

Sekusept® aktiv

Kombineret rengøring og desinfektionsmiddel, baseret på peredikesyre.

Aldehydfrit aktivt rengørings- og desinfektionsmiddel til instrumenter og specielt til termolabile endoskoper. CE-mærket i overensstemmelse med medicinsk direktiv MDD 93/42/EEG.

Sekusept aktiv er en kombination af højeste effektivitet og høj materialkompatibilitet for såvel plast og metalinstrumenter.

Sekusept aktiv:

- ▲ Samme middel til både rengøring og desinfektion, men i to arbejdsgange
- ▲ Særdeles effektiv desinfektion mod et bredt spektra af mikroorganismer inkl. bakteriesporer
- ▲ PerOxyBalance teknologi (Peredikesyre med neutralt eller svagt alkalisk pH-værdi)
- ▲ Et let anvendeligt produkt med lav dosering. Økonomisk og sikker i anvendelse.



Sekusept® aktiv

Kombineret rengøring og desinfektionsmiddel, baseret på peredikesyre.

Hvorfor bruge Sekusept aktiv?

Desinfektion har et vigtigt formål som er renhed. Dette er specielt gældende for termolabile instrumenter som ikke kan steriliseres.

Udelukkende den maximale reduktion af sekreter og restproteiner, garanterer et optimalt resultat ved rengøring af skoper og instrumenter



Sekusept Aktiv 1.5kg beholder

PEROXYBALANCE® KONCEPT

PerOxyBalance desinfektionsmiddel fra Ecolab giver en idealistisk balance imellem materialeforenelighed, hurtigt antimikrobiell effekt og anvendelse.

Optimering af PH værdien inden for det neutrale område. PerOxyBalance® er sikkert for såvel, patienter, personale og instrumenter.

PerOxyBalance®
The active substance with "Oxy Power"

OBS! Anbefales IKKE til messing, kobber eller mekanisk skadede forkromede instrumenter, da korrosion kan opstå.

DOKUMENTERET EFFEKT

MIKROBIOLOGISK TESTRESULTAT	KONCENTRATION	KONTAKTTID
Effekt under EN 13727 og EN 14561 (baktericid) samt EN 13624 (fungicid) i rene og urene forhold	2%	5 min
Effekt under EN 14562 (fungicid) i rene og urene forhold	4%	15 min
Effekt under EN 14348 og EN 14563 (mykobaktericid) i rene og urene forhold	2%	5 min
Effekt under EN 13704 (sporicid)	2%	15 min
Effekt under EN 14347 (sporicid - C difficile)	2%	5 min
Effekt under EN 14476 (virucid) i rene og urene forhold	2%	10 min

ANBEFALING	KONCENTRATION	KONTAKTTID
Bredt effektspektrum (baktericid, fungicid, sporicid, mykobaktericid och virucid)	4%	15 min

ECOLAB APS

Høffdingsvej 36
2500 Valby
Tel: +45 36 15 85 15
Fax: +45 36 15 85 48
www.dk.ecolab.eu

FABRIKANT

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173 599 0



SAFE.
FLEXIBLE.
RELIABLE.

ANVENDELSE

Til rengøring og desinfektion af medicinske udstyr/instrumenter. Specielt velegnet til termolabil medicinsk udstyr som for eksempel, visse former for fleksible endoskoper, ultralydsprober og transducere samt anæstesiudstyr og-instrumenter.

TILBEREDNING AF BRUGSOPLØSNING

Benyt den vedlagte måleskål = 40g/60ml til 1 liter vand, giver en opløsning på 4%. Bland vand og pulver og rør flere gange i opløsningen under 15 minutter. Efter 15 minutter er opløsningen klar til brug.

PROCEDURE

Rengøring og desinfektion foretages i 2 adskilte procedurer med samme produkt. Forbered to opløsninger - en til rengøring og en til desinfektion. Begge opløsninger skal som minimum skiftes dagligt eller når væsken er visuelt forurenet. Step 1: Instrumenterne rengøres manuelt ved mekanisk bearbejdning i kar tilsat rengøringsopløsningen. Step 2: Instrumenterne skylles med rent vand. Instrumenterne skal fremstå synligt rene. Step 3: Instrumenterne placeres i desinfektionsopløsningen i minimum det nedenfor angivne antal minutter. Det medicinske udstyr/instrumenterne skal være helt dækket. Step 4: Efterskyl med sterilt eller demineraliseret vand og lægges til tørre inden pakning.

AKTIVT KOMPONENT I PRODUKTET

Peredikesyre som dannes under tilberedning af brugsopløsningen.

PRODUKTINFORMATION OG BESTILLING

PRODUKT	ENHED	PAK	ART NR
Sekusept aktiv beholder med måleskål	1.5kg	4	3050510
Sekusept aktiv test strips	50 st	4	3007370

OMSTILLINGEN: **36158585**
dk-customerservice@ecolab.com

