

PRODUKTDATABLAD

Silent Knight pilleknuser



Crusher plate action

Silent Knight både knuser og maler pillerne, så resultatet bliver et ensartet, fint pulver, der er let at blande op i f.eks. yoghurt eller sondeernæring. Silent Knight er designet så den passer til alle, og let betjenes med et minimum af kræfter. Den har en specialdesignet støddæmper, og et ergonomisk håndtag, så pilleknusningen udføres meget effektivt og næsten lydløst, og man dermed ikke generer sovende patienter.

Posernes buede bund og top sikrer, at den knuste medicin er let at hælde ud, og det tykke, holdbare materiale reducerer effektivt farmaceutisk krydskontaminering og tab af medicin.

INDHOLDSTOFFER/MATERIALE:

Pilleknuser: Rustfrit stål, anodiseret aluminium.

Poser: Low Density Polyethylene (LDPE). FDA godkendt til farmaceutisk emballage

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Silent Knight er lavet af rustfri materialer og kan rengøres med en fugtig klud med vand og sæbe.
Til desinfektion: Ethanolspirit 75%

PRODUKTDATABLAD

Silent Knight pilleknuser

Sortimentsoversigt

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
7795007	Silent Knight pilleknuser	1 stk.	Stk.	MF1000242
7795009	Silent Knight poser	Pk. a 1000 stk.	Pk.	MF1000243

1. Læg pillerne i Silent Knight posen. Løft håndtaget og læg posen ned mellem knuserpladerne for at starte knusning.
2. Tryk håndtaget ned for at knuse pillerne. Løft håndtaget og træk posen halvvejs op på knusepladerne.
3. Tryk derefter håndtaget ned for at aktivere slibebevægelsen.

Tryk håndtaget ned flere gange for at male pillen / pillerne til fint pulver.

Gentag om nødvendigt.

4. Medicin pulveret er nu klar til administration

