



Biosynex hCG Graviditet Hurtig test Kassette

Biosynex hCG Hurtig Kassette test

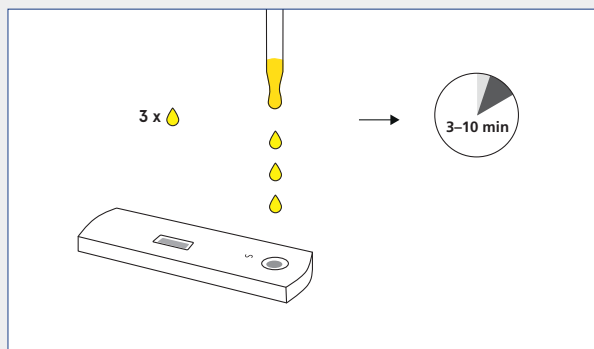


Placer testkassetten på en ren og plan overflade. Hold dråbetælleren lodret, og tilføj 3 dråber urin til prøve brønden (S). Start timeren. Læs resultaterne efter 3 minutter. Fortolk ikke resultaterne efter 10 minutter.

Fortolkning af resultaterne

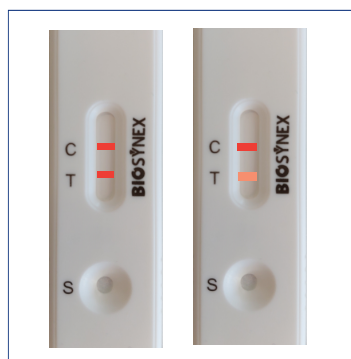


Positivt resultat

To farvede linjer vises. En linje vises i kontrollinjeregion (C) og en linje vises i testen linje region (T).

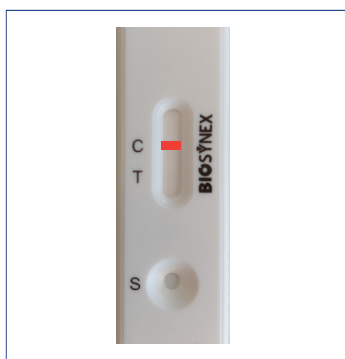

Negativt resultat

En farvet linje vises i kontrollinjeregion (C). Der vises ingen linje på testen linje region (T).

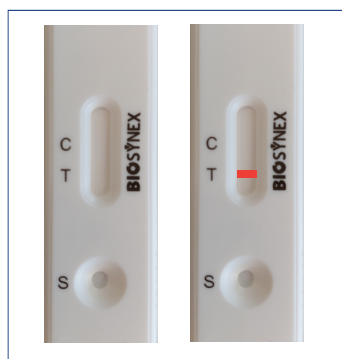

Ugyldigt resultat

Kontrollinje (C) udebliver. Gennemgå proceduren og gentag testen med en ny test. Hvis problemet fortsætter, afbryd brugen af testkittet og kontakt Mediq repræsentant.

Læs venligst
brugsvejledningen
inden testen
udføres.

Yderligere information

Biosynex hCG Graviditet Hurtig tests

Kun til professionel *in vitro*- diagnostisk brug

Prøveindsamling og håndtering

- Saml urinprøven i en ren og tør beholder.
- Urinprøver kan opbevares ved 2–8 °C i op til 48 timer inden testen udføres.

Hurtig test til tidlig påvisning af hCG i urin

- Human chorionic Gonadotropin (hCG) produceres af placenta, og dens koncentration stiger hurtigt efter befrugtning hvilket gør det til en fremragende markør til tidlig påvisning af graviditet. Biosynex hCG-graviditet Hurtig tests er en hurtig kromatografisk immunanalyse til hjælp med tidlig påvisning af graviditet.

Let at bruge

- Nem testprocedure
- Klare farvereaktioner for let resultat tolkning

Pålidelig og hurtig

- Resultater på 3 minutter
- Intern kontrol sikrer korrekt testfunktion

Produkt	Vare nr.
Biosynex hCG graviditetstest Urin Kassette, 40 tests	6404180

For bestilling:
Mediq Danmark Kundeservice
Telefon 3637 9110
E-Mail: prof@mediqdanmark.dk

